

コロナウイルス飛沫抑制器具: COVIDIU

<製品概要>

本製品は、浜松医科大学と協同組合 HAMING が連携し、新型コロナウイルスから医療従事者の感染リスク低減のために製作した飛沫感染抑制器具です。



<製品の構成と特徴>

- ステンレスフレーム + ビニール袋 (オプション) + クリップ (オプション)
- 軽量、丈夫、滅菌・消毒のし易さ
(高濃度アルコール・オートクレーブ等使用可能)

<製品の主な使用目的>

- 気管挿管・抜管時にコロナウイルスの飛散の抑制

<その他の用途 (実施例) >

- 救急外来で、運ばれてきた患者に対し、ストレッチャーの上で酸素吸入器具の取り付け後、患者を ICU に搬送する際、患者搬送用カバーとして使用
- 介護関連の病院では、だ液の採取が難しく、綿棒で検体をとらざるを得ない寝たきり患者さんの PCR 検査時に使用

<使用方法>

専用袋または、90L 透明ポリ袋を天地逆にして、金属フレーム内に入れ、市販の金属クリップを用いて骨組みの外から固定。ポリ袋の位置設定が決まったら、使用者の手を入れる穴や介助者用の穴を、使用者の使い勝手が良い位置に開ける。使用後はクリップを外して内面が汚染されたポリ袋をそのまま廃棄可能。

<全体的な 使用方法については下記動画をご参照ください。>

<https://youtu.be/QjbOFFvfHc>

<ポリ袋セット方法は下記動画をご参照ください。>

COVID Intubation Umbrella 専用袋セット方法動画

<https://youtu.be/IXz8IOTnHPk>

COVID Intubation Umbrella 市販ポリ袋のセット方法動画

<https://youtu.be/MNrt90dkzFl>

<製品仕様>

- 材質：ステンレス鋼
- サイズ：前部横幅 39 cm、後部横幅 43cm、奥行き 30 cm、高さ（手前 40 cm、奥 50 cm）
- 重さ：940g

フレーム画像



<お問い合わせ>

販売元： 橋本螺子(株)

連絡先住所：〒435-0028 浜松市南区飯田町 155

電話番号：053-461-5012

メール：itou@hashimoto-neji.co.jp

担当：伊藤直彦

URL：www.hashimoto-neji.co.jp



* 製品改善のため、予告なしに仕様変更を行う場合がございます。

2021/Ver.1

付図：フレーム図面

